



Synergy+ è L'innovativo sistema per la cura della pelle con 4 tecnologie integrate: BubbleBlue, OxyBlue, CosmoBlue, PollarFourBlue. L'insieme di queste tecnologie permette varie funzioni come: la pulizia del viso, il ringiovanimento cutaneo, la rivitalizzazione e tonicità al viso.

BubbleBlue genera un flusso continuo di liquidi sulla pelle, che permette una profonda pulizia, veicolando ed amplificando l'efficacia del cosmetico. Synergy+ introduce un innovativo utilizzo della radiofrequenza quadripolare e della tecnologia ad ultrasuoni.

OxyBlue sfruttando l'effetto Bhor (il rilascio dell'ossigeno da parte dell'emoglobina) ossigenando la pelle in maniera naturale. Grazie alla sinergia tra specifici cosmetici e apparecchiatura synergy+ offre una soluzione completa e perfetta per la cura della pelle.



#### BubbleBlue (Manipolo 1)

BubbleBlue utilizza differenti tipi di cosmetici idrosolubili in combinazione ad un'avanzata tecnologia vacuum. Quando il manipolo viene a contatto con la pelle, preleva una quantità di soluzione dalle boccette, e inonda la superficie con moltissime micro bolle. Queste bolle, in combinazione con il cosmetico nella soluzione, penetrano in profondità nella pelle e vengono riaspirate rapidamente dal manipolo così da pulire e rimuovere tutte le impurità.



#### OxyBlue 2 (Manipolo 2)

OxyBlue è ispirato ai benefici dei trattamenti termali, che favoriscono la naturale produzione di ossigeno della pelle grazie all'effetto Bhor. OxyBlue produce minuscole bolle di CO2 che esplodono dolcemente, abradingo la pelle. L'alta concentrazione di CO2 attiva un'ossigenazione naturale della pelle, così da aumentarne l'efficacia nell'area trattata. Contemporaneamente OxyBlue esfolia la pelle e crea un ambiente ottimale per una migliore efficacia di assorbimento dei principi attivi nei successivi trattamenti.



#### CosmoBlue (Manipolo 3)

CosmoBlue usa la tecnologia ad ultrasuoni per veicolare i cosmetici (liquidi), in profondità nella pelle, attraverso un sistema di precisione che controlla la velocità d'infusione del liquido. Grazie alla testina che vibra, l'assorbimento dei liquidi viene accelerato. Grazie al controllo preciso della velocità di infusione, il cosmetico risulta più efficace.



#### PollarFourBlue (Manipolo 4)

PollarFourBlue veicola l'energia della radiofrequenza sulla pelle attraverso lo strato grasso sub-cutaneo in maniera indolore. L'energia viene controllata, trasmessa e limitata alla zona specifica tramite degli elettrodi. I risultati sono immediatamente visibili sul viso.

L'obiettivo del trattamento è la rigenerazione delle fibre di collagene degli strati della pelle e ottenere un rassodamento e una sensibile diminuzione delle rughe.

## Kit Prodotti

La dotazione standard prevede un kit di cosmetici dedicati, sufficienti per 40/50 trattamenti.

Il kit è composta da:

- 10 buste SYNERGY D-SERUM 1 Soluzione detergente con acido salicilico
- 10 buste SYNERGY D-SERUM 2 Soluzione fluida sinergizzata di acido mandelico e acido salicilico per un peeling completo
- 10 buste SYNERGY D-SERUM 3 Soluzione anti-age, nutriente e idratante
- 10 buste SYNERGY D-SERUM 4 Soluzione detergente per manipoli ed interno macchina
- 10 buste SYNERGY D-LUCE GEL
- 10 buste SYNERGY D-ETA' GEL
- 9 CAPSULA ESFOLIANTE D-SCRUBBER
- 1 Conf. FIALOIDI BIOATTIVANTI ANTIRUGHE
- 1 Conf. FIALOIDI CON CELLULE STAMINALI DI STELLA ALPINA
- 1 Conf. FIALOIDI CALMANTI



## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Apparecchiatura:</b>	Synergy+
<b>Display:</b>	Color LCD Touch Screen 8 Pollici
<b>Modalità lavoro:</b>	Radio Frequenza – Ultrasuoni -Vacuum - Vibrazione 10-100 incremento: 10
<b>Energia RF:</b>	Frequenza: 1MHz Potenza max: 10W Picco energia: 200 ±20V 10-100 incremento: 10
<b>Ultrasuoni:</b>	Frequenza: 1MHz Potenza max: 10W
<b>Vacuum:</b>	25 Kpa - 90Kpa
<b>Potenza d'ingresso:</b>	100W (Max.)
<b>Peso netto</b>	±20 kg
<b>Umidità:</b>	<70%
<b>Misure:</b>	50 x 46 x 105 cm
<b>Alimentazione:</b>	AC 230-240V 50/60Hz
<b>Temperatura Trasporto e Stoccaggio:</b>	min 10°C - Max 40°C
<b>Temperatura Ambiente:</b>	min 10°C - Max 30°C

Le apparecchiature e i rispettivi parametri ad uso estetico, rientrano nel Decreto 206 del 15/10/2015. L'apparecchiatura deve essere usata solo ed esclusivamente presso locali e da personale specializzati ed autorizzati aventi i requisiti richiesti. La formazione degli operatori è a carico dell'acquirente. Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni, le immagini sono puramente indicative. L'importatore e il distributore declinano ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per un uso improprio della apparecchiatura.

